

Pulpotec. Pulpotec не содержит эвгенола и не нарушает адгезию и полимеризацию пломбирочных материалов.

Для снижения риска фактуры зуба, леченного методом пульпотомии, рекомендована установка искусственной коронки.

Возможные побочные эффекты

В большинстве случаев лечение препаратом Pulpotec практически не вызывает болевых ощущений. Однако описаны случаи сохранения болевых ощущений до проведения постоянной реставрации.

Описано 3 клинических варианта сохранения болезненности

1. Боль средней интенсивности продолжается вплоть до второго посещения. В таком случае необходимо полностью убрать Pulpotec из пульпарной камеры и положить новую порцию материала под временную повязку.

2. Боль при накусывании. Болевые ощущения стихают после проведения курса противовоспалительной терапии.

3. Острая боль возникает приблизительно в 1 случае на 1000 пациентов и может быть вызвана следующими причинами:

- > Применение препарата Pulpotec при периодонтите.
- > Не диагностированная трещина коронки или перфорация дна полости зуба.

В таких случаях следует удалить материал из пульпарной камеры, скорректировать диагноз и изменить тактику лечения в соответствии с новым диагнозом.

Примечание

После лечения зуба с применением препарата Pulpotec и протезирования, возможно появление боли при накусывании при нормальной рентгенологической картине в срок от 3 месяцев до нескольких лет. Обычно это является следствием перегрузки зуба и проходит после коррекции окклюзионных контактов.

Меры предосторожности

Не использовать Pulpotec после пульпэктомии.

Избегать контакта материала со слизистой оболочкой полости рта. В случае контакта — обильно промыть водой. Содержит токсичные при вдыхании и приеме внутрь формальдегид и полиоксиметилен.

При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки. В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

В случае проглатывания промыть рот. Пейте много воды водой и обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случаи известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5°C-30°C в сухом, защищенном от прямого света месте.

Срок хранения 3 года.

Упаковка

2 флакона 15г порошка и 15 мл жидкости



11562

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.